

CARTÃO DE COLETA DE PÊLOS PARA EXAME DE MUTAÇÃO TOBIANA

Nome do Animal: _____ Sexo: () Masculino () Feminino

Nº do Registro: _____ Raça: _____

Nome do coletor: _____


RG ou C. Prof. do coletor: _____ Data e Local: _____

Assinatura do Responsável pela coleta: _____

Proprietário: _____

USO INTERNO
Reservado para código de barras

Coloque os bulbos (raiz)
dos pêlos (20 a 30) no campo abaixo

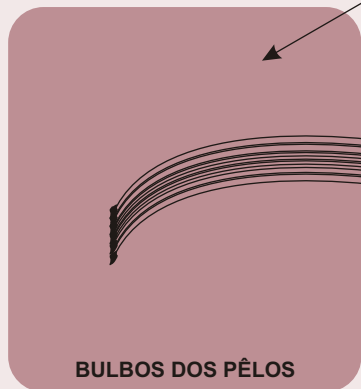

Cole uma fita adesiva
sobre os pêlos neste
campo para segurá-los

Se necessário, corte o excesso
de pêlos da ponta



INFORMAÇÕES PARA COLETA DE AMOSTRAS DE PÊLO

- Coletar pêlos da cauda ou pêlos da crina .
- Limpar cuidadosamente o local com papel absorvente.
- Enrolar no dedo indicador de 5 a 10 fios de cada vez, puxar firme de modo que a raiz dos pêlos seja retirada juntamente com as amostras.
- Não cortar os pêlos. Fios sem raiz não servirão para o teste. Enviar de 20 a 30 fios por animal.
- Anexar os pêlos de no máximo 10 centímetros na etiqueta com cuidado para não colar as raízes. No caso desses serem compridos deve-se cortar as pontas (nunca a raiz).
- Nunca misturar pêlos de diferentes animais num mesmo envelope.
- Obrigatório identificar corretamente as amostras com o nome ou registro do animal.